

RÜSCH CARE S-BAG FÜR DEN HOMECARE BEREICH



GESCHLOSSENES
URINDRAINAGESYSTEM FÜR
DIE STANDARDDRAINAGE
MIT LANGER VERWEILDAUER

EINFACH, SICHER UND HYGIENISCH

Mit qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen und innovativen Produkten ermöglicht Teleflex ihren Urindrainage-Patienten eine bessere Lebensqualität und bietet maximale Sicherheit gegenüber nosokomialen Harnwegsinfektionen. Etwa 90% dieser Infektionen werden durch eine herkömmliche Urindrainage verursacht. Mit unserem geschlossenen Urindrainagesystem, das alle hygienischen Anforderungen an eine medizinische Langzeitversorgung erfüllt, ist der erste und wichtigste Schritt der Prophylaxe getan.

Darüber hinaus kann der Anwender maßgeblich dazu beitragen, das Infektionsrisiko noch weiter zu verringern:

Sofern keine Latexallergie vorliegt, kann ein Blasenkatheter aus Latex für einen Einsatz bis zu 5 Tage verwendet werden. Für eine längerfristige Drainage empfehlen wir jedoch einen latexfreien Katheter aus Silikon, z.B. unsere Rüsch Brillant Ballonkatheter aus der AquaFlate Glycerine Serie.

An Urindrainagesystemen sollte so wenig wie möglich manipuliert werden; falls es aber notwendig ist, sollten Handschuhe benutzt werden. Vor und nach jeder Manipulation, z.B. einer Entleerung, ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich.

Der Urinauffangbeutel sollte regelmäßig und rechtzeitig geleert werden, bevor der Urin mit dem Rückflussventil in der Tropfkammer in Kontakt kommt.

Die Verbindung zwischen Urinauffangbeutel und Blasenkatheter sollte nicht ohne triftigen Grund getrennt werden. Vor einer erneuten Konnektion der beiden Bestandteile muss die Verbindungsstelle ausreichend mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis desinfiziert werden.

Der Urinauffangbeutel sollte immer unter dem Blasenniveau hängen.

Der Schlauch muss immer knickfrei sein. Verwenden Sie die mitgelieferte Bettuchklammer, um ihn richtig zu fixieren.

Weder der Blasenkatheter noch der Urinauffangbeutel sollten routinemäßig ausgewechselt werden. Wenn jedoch Inkrustationen, Obstruktionen oder Verschmutzung einen Wechsel notwendig machen, muss das gesamte Urindrainagesystem ersetzt werden.

Inkrustationen kann durch eine Erhöhung der Tagestrinkmenge vorgebeugt werden.

Auch die regelmäßige Intimhygiene ist eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Infektionen.




Optimal zentrierte Befestigung mit Doppelhaken und zusätzliche Sicherheit durch extra Kordel mit Schlaufe

Flexibler und knickstabiler 120 cm langer Schlauch mit Schiebeklemme und Betttuchklammer



2000 ml großer, belüfteter Urinauffangbeutel mit deutlicher Graduierung in ml.

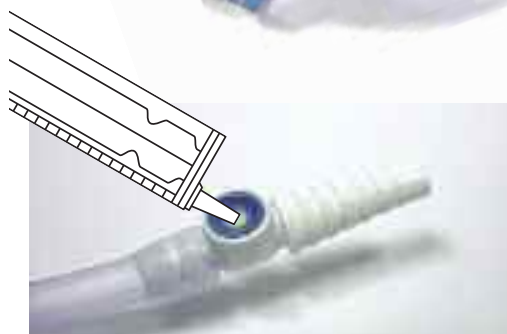

Nadelfreie Urinprobeentnahme

Speziell gestalteter Universalstufenkonnektor mit Schutzkappe und mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle. Die Konnektorstufen sind gegen die Abzugsrichtung angeordnet und verhindern somit das Herausrutschen aus dem Kathetertrichter.

Hygisches und schnelles Entleeren

Nachtropfsicheres Bodenablassventil mit Einhandklemme, „Doghouse“-Halter zur Befestigung des Ablassschlauchs, zur Vermeidung von Kontamination und für zusätzliche Bodenfreiheit.

Belüftete Tropfkammer mit integriertem Rückflussventil

Die belüftete Tropfkammer mit hohem Tropfniveau und sicher funktionierendem Ventil verhindert den Rückfluss von Urin sowie intraluminal aufsteigende Infektionen. Optimaler Druckausgleich und zuverlässige Abflussleistung dank bakterien-dichter Belüftung.

PRODUKTINFORMATIONEN

Latexfreies geschlossenes Urindrainagesystem für die Standarddrainage mit langer Verweildauer

Rüsch Care S-Bag				
Art.	Fassungsvermögen	Schlauchlänge	VE	PZ-Nr.*
850 414	2000 ml	120 cm	20	0123725
mit Gebrauchsanleitung, doppelt verpackt, steril, zum Einmalgebrauch, latexfrei				

* Pharmazentralnummer für Deutschland

Vertrieb durch:

GERMANY • Teleflex Medical GmbH • Willy-Rüsch-Str. 4-10 • 71394 Kernen
 Phone +49 (0)7151 406 0 • Fax +49 (0)7151 406 150 • info.de@teleflex.com
AUSTRIA • Rüsch Austria Gesellschaft m.b.H. • A-1090 Wien
 Phone +43 (0)1 402 47 72 • Fax +43 (0)1 402 47 72 77 • info.at@teleflex.com
SWITZERLAND • Rüsch (Schweiz) AG • CH-3123 Belp
 Phone +41 (0)31 819 73 90 • Fax +41 (0)31 819 73 87 • info.ch@teleflex.com

www.ruesch-care.de • www.teleflex.com