



## EPISTAR FIX

Sichere und problemlose epidurale Katheterfixierung

### AUF EINEN BLICK

- sichert und schützt den Katheter bis zu einer Woche
- trägt zur Vermeidung von Kontaminationen der Punktionsstelle bei
- bedeutet mehr Patientenkomfort und Flexibilität
- ermöglicht die Sichtprüfung von Punktionsstelle und Katheterposition
- Reduktion von Hautreizungen
- steril, latexfrei, PVC-frei, DEHP-frei

### FIXIERVORRICHTUNG FÜR EPIDURALKATHETER


Die EpiStar Fix epidurale Katheterfixierung von Teleflex besteht aus einer extrem hautfreundlichen Klebefläche und einem speziell geformten Schaumstoffblock, der den Epiduralkatheter sicher fixiert. Der Hydrokolloid-Träger absorbiert Körperflüssigkeit oder Anästhetika, die nach der Lokalanästhesie aus der Punktionsstelle zurückfließen können. Der weiche Schaumstoffträger verhindert das Abknicken des Katheters, auch wenn der Patient auf ihm liegt. Dank der perforierten Oberseite lässt sich die Fixierung leicht wechseln.

### ZUM VORTEIL DES PATIENTEN

Epiduralkatheter lassen sich durch PU-Folie oder andere Haftverbände in der Regel schlecht fixieren. Häufig kommt es zu einer Dislokation des Katheters. Diese führt nicht nur dazu, dass die Anästhesie nicht mehr erfolgreich durchgeführt werden kann, sondern dass der Patient sich nochmals Katheterisieren lassen muss. Bei Verwendung von EpiStar Fix kommt eine versehentliche Dislokation des Epiduralkatheters sehr selten vor. Da der Hydrokolloid-Träger auf Hautreizungen umfangreich getestet wurde, ist die Wahrscheinlichkeit von Hautreaktionen extrem gering. Die epidurale Katheterfixierung ermöglicht dem Patienten eine hohe Bewegungsfreiheit und er kann damit duschen gehen.


## EINFACHE ANWENDUNG

EpiStar Fix lässt sich einfach und schnell anlegen und ermöglicht eine standardisierte, sichere Fixierung des Epiduralkatheters. Dabei spielt es keine Rolle, welcher Mitarbeiter für die Katheterfixierung verantwortlich ist.

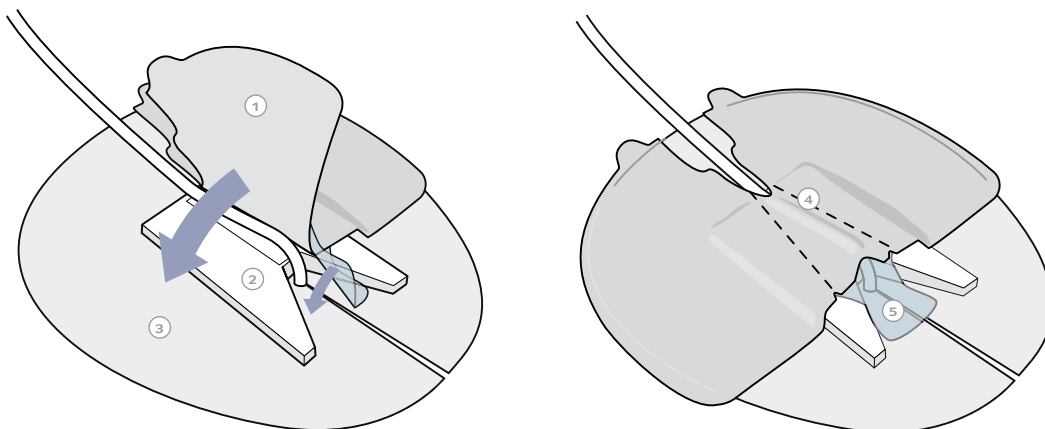

- ① sichere Fixierung des Katheters durch weiche Vliesabdeckung mit guter Haftung
- ② PE-Schaumhalterung
- ③ dünner, komfortabler Hydrokolloid-Träger
- ④ einfacher Wechsel der Fixierung dank perforierter Oberseite
- ⑤ die durchsichtige Hydrokolloidabdeckung ermöglicht die Kontrolle der Punktionsstelle

## BESTELLINFORMATIONEN

EPISTAR FIX			
	ART. NR.	BESCHREIBUNG	VE
	190915-000000	Fixierung für Epiduralkatheter	25

*EpiStar Fix ist ein Produkt von  
CopenhagenMedLab Aps*

### VERTRIEB DURCH:

**TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND** · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflex.com

**DEUTSCHLAND** Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflex.com

**ÖSTERREICH** Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflex.com

**SCHWEIZ** Tel. +41 (0)31 818 40 90 · info.ch@teleflex.com

**WWW.TELEFLEX.COM**

94 11 01 - 00 00 00 · REV A · 06 11 01 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.

**Teleflex**