



AMBIT® PCA PUMPE

Patientengesteuerte Schmerztherapie – einfach und effektiv



AUF EINEN BLICK

- leichtes und mobiles Gerät für den Patienten
- intelligente und einfache Schmerzkontrolle
- einfache Programmierung
- visuelle und akustische Alarme
- keine Instandhaltung
- Kostenersparnis



ambIT® ist eine Handelsmarke von Summit Medical Products, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

WIE KÖNNEN SIE SICHERSTELLEN, DASS DIE SCHMERZTHERAPIE IHRER PATIENTEN EINFACH UND KOMFORTABEL IST?

Die ambIT PCA Pumpe – das ambulante Schmerzkontrollsystem. Die Infusionspumpe bietet höchst flexible, genaue und sichere therapiespezifische Konfigurationen zu günstigsten Betriebskosten und Zubehörpreisen für das postoperative Schmerzmanagement.

- Einstellung “nur Bolus” oder “nur Basalrate” möglich
- einfache Programmierung und Handhabung
- individuelle Schmerztherapie durch Bolus-Fähigkeit – weniger Durchbruchschmerzen

DIE WICHTIGSTEN VORTEILE DIESES SYSTEMS

- geringere Abhängigkeit von systemischen Arzneimitteln (Konzentration auf den Schmerzursprung)
- weniger Komplikationen im Zusammenhang mit systemischen Arzneimitteln
- weniger Schmerzen und geringere Nebenwirkungen durch genauere Dosierung
- schnellere Erholung (ambulante Behandlung und weniger Schmerzen fördern die Heilung)

AMBIT® PCA – EIN NEUER STANDARD IM SCHMERZMANAGEMENT

| TECHNISCHE DETAILS | |
|--------------------------------------|---|
| Latexfrei und DEHP-frei | |
| Pumpenmechanismus | mikroprozessorgesteuerte Drehperistaltik |
| Maximaler Infusions-/Okklusionsdruck | 25 ±12 psi (172,4 ± 82,7 kPa) |
| Hubvolumen | 50 µl |
| Volumetrische Genauigkeit | ± 6 % |
| Minimale Basal-Flussrate | 0,1 ml/h |
| Maximale Basal-Flussrate | 20 ml/h |
| Stromversorgung | intern, zwei identische 1,5-V-AA-Alkalibatterien |
| Batteriedauer | 14 Tage bei 1ml/h, 2 Tage bei 10 ml/h |
| Verlaufsberichte | <ul style="list-style-type: none"> • infundiertes Volumen • Anzahl Bolusanforderungen • Anzahl Bolusabgaben • verstrichene Zeit |
| Gewicht | 133,2 Gramm ohne Batterien, 181,4 Gramm mit Batterien |
| Abmessungen | 55 mm x 36 mm x 175 mm |

BASAL

| MAXIMALE BASAL-FLUSSRATE | MINIMALE BASAL-FLUSSRATE | BASAL-FLUSSRATEN |
|--------------------------|--------------------------|--|
| 20 ml/Std. | 0,1 ml/Std. | 0,1 bis 20 ml/Std. in 0,1 ml/Std.-Abständen |

BOLUS

| BOLUS-VOLUMEN | BOLUS-SPERRZEIT |
|-----------------------------------|---|
| 0,1 bis 20 ml in 0,1 ml-Abständen | 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 45 min, 1 Std., 1,5 Std., 2 Std., 4 Std., 8 Std., 12 Std. |

BESTELLINFORMATION

AMBIT PCA PUMPE

| ART. NR. | BESCHREIBUNG | VE |
|-----------|------------------------|----|
| SP-220262 | ambIT® PCA Pumpe | 1 |
| SP-220140 | Kassette mit Spike | 20 |
| SP-220266 | Kassette mit Luer-Lock | 20 |

ZUBEHÖR

| ART. NR. | BESCHREIBUNG | VE |
|-----------|--|----|
| SP-220265 | Bolus-Fernauslöser (optional) | 1 |
| SP-220409 | Tragetasche mit Gürtel | 1 |
| SP-220121 | MedibagTM 250 ml/cc für Luer Lock Anschluss | 60 |
| SP-220278 | MedibagTM 420 ml/cc für Luer Lock Anschluss | 60 |
| SP-220246 | Lock Box für ambIT® PCA zum Verschluss von Infusionsbeutel, Kassette und Pumpe | 1 |
| SP-220275 | Halterung für Infusionsständer für Lock Box | 1 |
| SP-220403 | Start/Pause Schalter-Schutz | 1 |
| SP-220410 | Einpatiententasche (Klarsichttasche) | 10 |
| SP-220444 | Transportdeckel | 1 |

Folgende ARROW-Produkte können zusammen mit der ambIT® Pumpe bei der individuellen Schmerztherapie eingesetzt werden:

- StimuCath® Katheter zur kontinuierlichen peripheren Nervenblockade*
- FlexTip PLUS® Epiduralkatheter

* Bitte Gebrauchsanweisung für StimuCath® Katheter beachten

VERTRIEB DURCH:

TELEFLEX MEDICAL ZENTRALE EMEA, IRLAND · Teleflex Medical Europe Ltd. · IDA Business Park · Athlone · Co Westmeath

Tel. +353 (0)9 06 46 08 00 · Fax +353 (0)14 37 07 73 · orders.intl@teleflexmedical.com

DEUTSCHLAND Tel. +49 (0)7151 406 0 · info.de@teleflexmedical.com

ÖSTERREICH Tel. +43 (0)1 402 47 72 · rueschaustria@teleflexmedical.com

SCHWEIZ Tel. +41 (0)31 818 40 90 · switzerland@teleflexmedical.com

WWW.TELEFLEXMEDICAL.COM

94 10 23 - 00 00 00 · REV A · 11 10 02 · Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten.



- ① Filter
- ② Kassette
- ③ Start/Pause-Taste
- ④ Bolus-Taste
- ⑤ On/Off

Teleflex