



## P - B A G GESCHLOSSENES URINDRAINAGESYSTEM FÜR KINDER FÜR DIE STANDARD DRAINAGE MIT LANGER VERWEILDAUER

### EINFACH, SICHER UND HYGIENISCH

Mit qualitativ hochwertigen, wirtschaftlichen und innovativen Produkten ermöglicht Teleflex Medical Urindrainage-Patienten jeden Alters eine bessere Lebensqualität und bietet ihnen maximale Sicherheit gegenüber nosokomialen Harnwegsinfektionen. Dies ist besonders bei Kindern wichtig, da sie empfindlicher sind und sensibler als Erwachsene reagieren.

Da etwa 90% der nosokomialen Harnwegsinfektionen durch eine herkömmliche Urindrainage verursacht werden, ist mit unserem geschlossenen Urindrainagesystem, das alle hygienischen Anforderungen an eine medizinische Langzeitversorgung erfüllt, bereits der erste und wichtigste Schritt der Prophylaxe getan.

Darüber hinaus kann der Anwender maßgeblich dazu beitragen, das Infektionsrisiko des Patienten noch weiter zu verringern:

Der Urinauffangbeutel sollte immer unterhalb des Blasen-niveaus hängen.

Der Schlauch des Urinauffangbeutels muss immer knickfrei sein. Verwenden Sie die mitgelieferte Bettuchklammer, um ihn richtig zu fixieren.

Inkrustationen kann durch eine Erhöhung der Tagestrinkmenge vorgebeugt werden.

Auch die regelmäßige Intimhygiene ist eine wichtige Maßnahme zur Vermeidung von Infektionen.

An Urindrainagesystemen sollte so wenig wie möglich manipuliert werden; falls es aber notwendig ist, sollten immer Handschuhe getragen werden. Vor und nach jeder Manipulation, z.B. einer Entleerung des Beutels, ist eine hygienische Händedesinfektion erforderlich.

Der Urinauffangbeutel sollte regelmäßig und rechtzeitig geleert werden, bevor der Urin mit dem Rückflussventil in der Tropfkammer in Kontakt kommt.

Die Verbindung zwischen Urinauffangbeutel und Blasen-katheter sollte nicht ohne triftigen Grund getrennt werden. Vor einer erneuten Konnektion der beiden Bestandteile muss die Verbindungsstelle ausreichend mit einem Desinfektionsmittel auf Alkoholbasis desinfiziert werden.

Weder der Blasen-katheter noch der Urinauffangbeutel sollten routinemäßig ausgewechselt werden. Wenn jedoch Inkrustationen, Obstruktionen oder Verschmutzung einen Wechsel notwendig machen, muss immer das gesamte Urindrainagesystem (Blasen-katheter und Urinauffangbeutel) ersetzt werden.

### AUF EINEN BLICK

- Urinauffangbeutel mit 1000 ml Fassungsvermögen und deutlicher Graduierung in ml
- Universalstufenkonnektor mit nadelfreier Urinprobeentnahmestelle
- Flexibler und knickstabiler 90 cm langer Schlauch mit Schiebeklammer und Bettuchklammer
- Optimal zentrierte Befestigung mit Doppelhaken und zusätzlicher Kordel
- Tropfkammer mit integriertem Rückflussventil
- Zweifache bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftung
- Tropfsicheres Bodenablassventil mit „Doghouse“-Halter



**NADELFREIE URINPROBEENTNAHME**  
 Speziell gestalteter Universalstufenkonnektor mit Schutzkappe und nadelfreier Urinprobeentnahmestelle – geeignet für alle gängigen Katheter. Die Konnektorstufen sind gegen die Abzugsrichtung angeordnet und verhindern das Herausrutschen aus dem Kathetertrichter.



**HYGIENISCHES UND SCHNELLES ENTLEREEN DES BEUTELS**  
 Nachtropfsicheres Bodenablassventil mit Einhandbedienung und „Doghouse“-Halter zur Befestigung des Ablassschlauchs, zur Vermeidung von Kontamination und für zusätzliche Bodenfreiheit.




**BELÜFTETE TROPFKAMMER MIT INTEGRIERTEM RÜCKFLUSSVENTIL**  
 Die belüftete Tropfkammer mit hohem Tropfniveau und sicher funktionierendem Ventil verhindert den Rückfluss von Urin sowie intraluminal aufsteigende Infektionen. Die bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftung sorgt für optimalen Druckausgleich und zuverlässige Abflussleistung.

- ① Universalstufenkonnektor mit Schutzkappe und nadelfreier Urinprobeentnahmestelle
- ② Schiebeklemme
- ③ Betttuchklammer
- ④ Doppelhaken mit zusätzlicher Kordel
- ⑤ Belüftete Tropfkammer mit integriertem Rückflussventil
- ⑥ Zusätzliche bakterien- und flüssigkeitsdichte Belüftung
- ⑦ Bodenablassventil mit „Doghouse“-Halter

## PRODUKTINFORMATIONEN

Latexfreies geschlossenes Urindrainagesystem für Kinder für die Standarddrainage mit langer Verweildauer, steril, zum Einmalgebrauch.

RÜSCH P-BAG			RÜSCH
ART. NR.	FASSUNGSVERMÖGEN	SCHLAUHLÄNGE	VE
67 30 52	1000 ml	90 cm	20

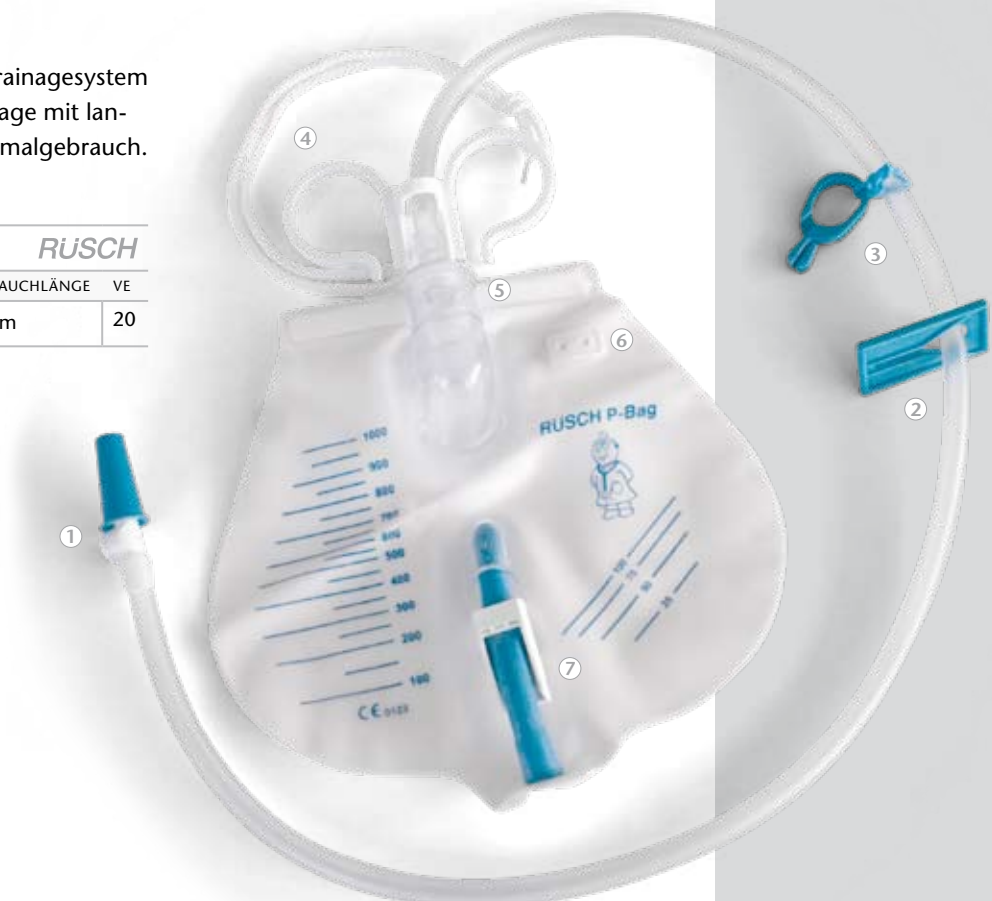

Vertrieb durch:  
 Teleflex Medical GmbH • 71394 Kernen • Deutschland  
 Tel. +49 7151 406 0 • Fax +49 7151 406 150 • info.de@teleflexmedical.com  
 Rüschi Austria Gesellschaft m.b.H. • A-1090 Wien • Österreich  
 Tel. +43 (0)1 402 47 72 • Fax +43 (0)1 402 47 72 77 • rueschaustria@teleflexmedical.com  
 TELEFLEX MEDICAL AG • CH-3123 Belp • Schweiz  
 Phone +41 (0)31 818 40 90 • Fax +41 (0)31 818 40 93 • info@ruesch-schweiz.ch  
 www.ruesch.de • www.teleflexmedical.com