


TracheoQuick

Koniotomiebesteck

Bei Verlegung der oberen Atemwege
in Notfall-Situationen
für Erwachsene und Kinder.

RÜSCH®

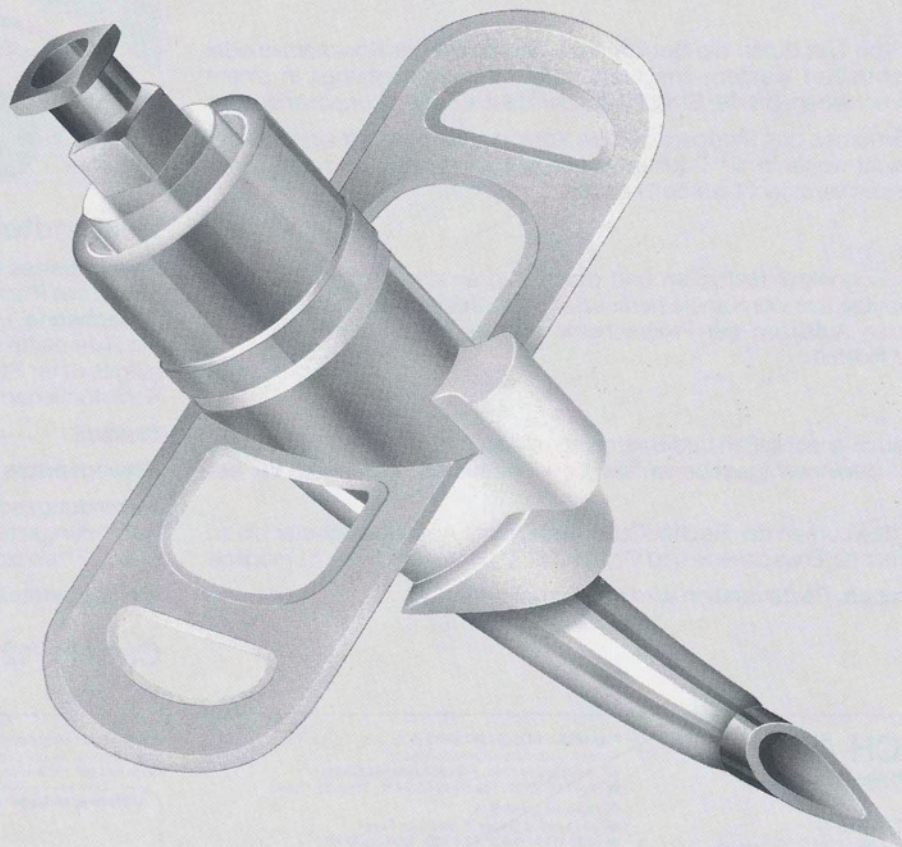

Cat.No. 120600

TracheoQuick

Notfall-Koniotomiebesteck
für Erwachsene und Kinder

Indikationen

Erstickungsgefahr.

Verlegung der oberen Atemwege in Notfall-Situationen, bei denen eine Intubation erfolglos versucht wurde bzw. eine Tracheotomie nicht sicher und schnell genug durchgeführt werden kann.

Anwendung

1. Schritt

Rückenlage des Patienten. Nackenpartie stabil lagern (ein Kissen oder ein Bekleidungsstück unter die Schulter des Patienten legen) und Kopf überstrecken.

Zwischen Daumen und Zeigefinger den Kehlkopf seitlich fixieren; Aufsuchen des Ligamentum cricothyroideum (in der Mittellinie zwischen Schildknorpel und Ringknorpel).

Mit beiliegendem Skalpell eine quere Hautinzision vornehmen, um das Einführen des TracheoQuick zu erleichtern (bei Bedarf kann der TracheoQuick auch ohne vorausgegangene Hautinzision eingestochen werden).

2. Schritt

Korrekten Sitz von Punktionsnadel und Stopper an der Kanüle überprüfen.

Der TracheoQuick wird jetzt in einem Winkel von 90° an der Inzision eingestochen. Dabei ist darauf zu achten, daß der ausgeübte Druck gleichmäßig auf die konnektierte Spritze und den Konnektor der Kanüle verteilt wird, um ein Abknicken des Spritzenansatzes zu vermeiden.

3. Schritt

Durch Aspiration von Luft durch die Spritze kann der Eintritt der Koniotomienadel in die Trachea kontrolliert werden; anschließend die Koniotomieeinheit in einem Winkel von 45° vorschieben, bis der Stopper auf der Haut aufsitzt. Stopper entfernen.

Achtung: Nach Entfernen des Stoppers darf die Koniotomieeinheit mit eingesetzter Punktionsnadel nicht weiter in die Trachea vorgeschoben werden, da sonst Läsionen der Tracheawand verursacht werden können.

4. Schritt




Plastikkanüle am Konnektor festhalten und durch Zug an der Spritze die Koniotomienadel mit Spritze aus der Kanüle herausziehen. Während des Herausziehens die Kanüle bis zum Aufsitzen der Fixierscheibe auf der Haut vorschieben und mittels Halteband fixieren.

5. Schritt

Verbindungsschlauch anschließen und Beatmung mittels Ambubeutel, Beatmungsgerät oder Mund beginnen (gegebenenfalls beiliegendes Verbindungsstück einsetzen).

Absaugen durch das Lumen der TracheoQuick-Kanüle mit Absaugekatheter bis zu Ch. 12/O.D. 4,0 mm für Erwachsene und Ch. 6/O.D. 2,0 mm für Kinder ist möglich.

Zum Einmalgebrauch. Resterilisation wird nicht empfohlen.

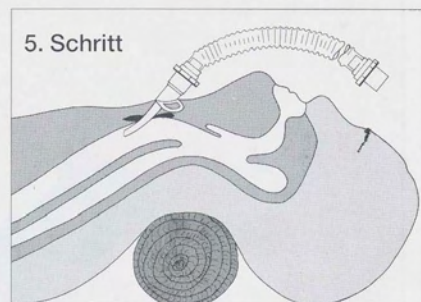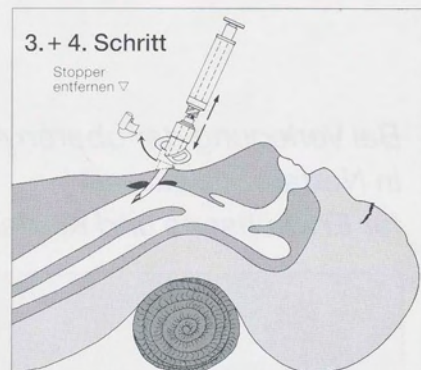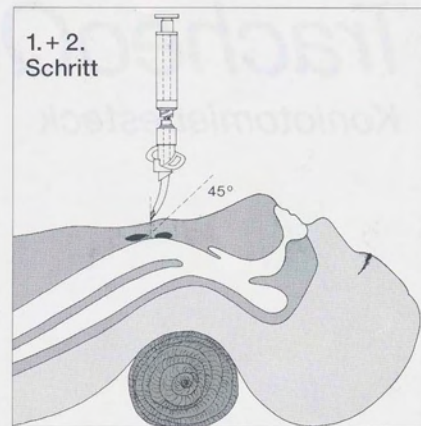

Bestandteile

Vormontiertes Koniotomiebesteck:
Kanüle aus Plastik, I.D. 4,0 mm für Erwachsene, I.D. 2,0 mm für Kinder, mit Fixierplatte und Halteband, aufgesetzter Stopper, konische Koniotomienadel aus Edelstahl.

Skalpell

Einwegspritze

Verbindungsschlauch aus Silikon, Verbindungsstücke I.D. 15 mm, O.D. 22 mm bzw. O.D. 15 mm.

Alle Bestandteile sind **steril** verpackt.

Cat.No. 12 06 00

WILLY RÜSCH AG

☐ P.O. Box 11 80 · 71385 Kernen
Germany
☎ Waiblingen (071 51) 406-0
Fax (071 51) 40 61 80 · ☐ 724-309 wiru d

AUSTRIA RÜSCH AUSTRIA Gesellschaft m.b.H.
Lazarettgasse 24, A-1095 Wien
☎ (01) 402 47 72 / 402 54 70 / 408 68 51
Fax (01) 402 47 72 77 / 402 54 70 77

CANADA RÜSCH-PILLING Inc.
No. 4-2 Select Avenue, Scarborough, Ontario M1V 5J4
☎ (416) 321-1445, Free Phone 800-387-9699
Fax (416) 321-1447

DENMARK RÜSCH DANMARK ApS
Islandsvej 3, DK-4681 Herfølge
☎ 56 21 42 00, Fax 56 21 67 56

FRANCE RÜSCH-PILLING S.A.
Service Commercial Division RÜsch
23, Avenue des Prés, F 94268 Fresnes Cédex
☎ (1) 47 02 20 05, Fax (1) 47 02 24 15, Télex 63 48 49 f

RÜSCH-PILLING S.A.
Siège Social et Dépot, F 31460 Le Faget
☎ 61 83 11 92, Fax 61 83 47 20, Télex 53 32 28 f

GREAT BRITAIN RÜSCH UK Ltda.
P.O. Box 138, Halifax Road
High Wycombe, Bucks. HP 12 3NB
☎ 0494-53 27 61, Telex 83 611 TFX Med
Fax 0494-53 42 23 / 52 46 50

URUGUAY RÜSCH Uruguay Ltda.
Casilla de Correo 5078, Montevideo
☎ 60 52 11 / 60 58 35 / 60 85 14
Fax 61 98 37 / 61 39 58

USA RÜSCH Incorporated
2450 Meadowbrook Parkway, Duluth, Georgia 30136
☎ (404) 623-0816, Fax (404) 623-1829

Alle Angaben entsprechen unserem Kenntnisstand bei Drucklegung. Technische Änderungen vorbehalten. Gedruckt auf 100% chlorfrei gebleichtem Papier.



Lieferung ab Lager durch den Fachhandel.

Printed in Germany, Imprimé en R.F.A.
Druckerei Täuber GmbH, Waiblingen 93 16 20 07 94 05 d.